



## **LICHTHÄRTENDER KLEBER**

### **Gebrauchsanweisung**

### **Band Zement **BLAU****

**Achtung:** BAND ZEMENT **BLAU** enthält Acrylatmonomere. Von Acrylatmonomeren ist bekannt, dass sie bei bestimmten empfindlichen Personen allergische Hautreaktionen hervorrufen. Kann Augen- und Hautreizungen verursachen.

**Vorsichtsmaßnahmen:** Augen- und Hautkontakt vermeiden. Tragen Sie beim Umgang mit diesem Material Handschuhe.

#### **Erste Hilfe:**

**Augenkontakt:** Sofort mit viel Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.

**Hautkontakt:** Betroffene Stelle mit Wasser und Seife waschen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.

**Vorsichtsmaßnahme:** Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur Handhabung, zur richtigen Verwendung und den Empfehlungen zum Augenschutz, wenn Sie eine Polymerisationslampe verwenden.

#### **Anwendungsgebiete:**

##### **A: Zahnpräparation:**

1. Gründlich ausspülen
2. Zähne isolieren
3. Gründlich mit öl- und feuchtigkeitsfreier Luft trockne

##### **B: Säureätzung:**

Tragen Sie BAND ZEMENT **BLAU** Ätzel auf die Zahnoberflächen auf und befolgen Sie die Anweisungen, die mit dem Ätzel-Abgabesystem geliefert werden. Wenn Sie andere Ätzelssysteme verwenden, konsultieren Sie die Anweisungen des Herstellers für die richtige Technik und die empfohlenen Ätzeiten. Warten Sie 30-60 Sekunden für das Ätzen. Anschließend gründlich ausspülen.

##### **C: Platzierung und Aushärtung**

1. Lufttrocknen

##### **Zum Öffnen der Okklusion des Patienten**

Tragen Sie den BAND ZEMENT **BLAU** Kleber in das Bissmodell oder auf die zentrale Fossa der oberen Backenzähne auf. Nach der endgültigen Position Licht für ca. 20 Sekunden aushärten.

##### **Für Bänder Kleben**

Tragen Sie den BAND ZEMENT **BLAU** Kleber auf das Band auf und härten Sie es 2 Sekunden lang aus. Entfernen Sie den zusätzlichen blauen Kleber von den Zähnen. Dann lassen Sie den Kleber an der Seite des Bandes für etwa 20 Sekunden Licht aushärten.

#### **D. Lagerung und Verwendung**

1. An einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärme-, Licht- und Zündquellen lagern.
2. Lagern Sie das Material nicht in der Nähe von Eugenol haltigen Produkten, da dies die ordnungsgemäße Aushärtung des Klebstoffs beeinträchtigen kann.
3. Dieses System ist für die Verwendung bei Raumtemperatur (20-25 °C, 68-77 °F) ausgelegt.

Lagerung zwischen 2-27 °C/35-80 °F Lichtempfindlich.

4. Die Haltbarkeit bei Raumtemperatur entspricht dem Verfallsdatum auf der Box/Verpackung.

#### **E. Gültigkeit**

18 Monate, detaillierte Informationen siehe Verpackung.